



BABYBELLE


母乳收集器

型號：BBP11



產品介紹
使用說明書

一、母乳收集器部件說明

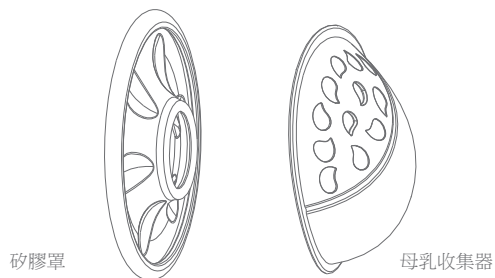


二、注意事項

- 使用產品前請仔細閱讀使用說明書，並妥善保管本使用說明書。
- 產品可浸入水中清洗。
- 不要讓產品暴露或觸碰任何高溫環境或物品，如日照或暖爐。
- 在使用過程中，如有任何不適時，請停止使用本產品。
- 請向醫療或母乳餵哺專家諮詢本產品的正確使用方法，以減少因不正確使用而引至的不適。

三、使用說明

在第一次使用產品之前，請花少許時間熟悉本說明書，並保留以便以後參考。母乳收集器以防止母乳溢出而設計，讓母親保持清潔衛生與舒適。產品裝配及使用如下圖：

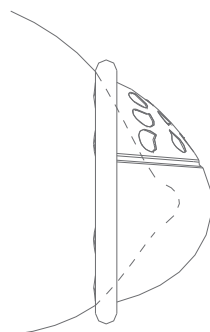

- 使用前須清潔本產品並保持乾爽衛生。
- 哺乳前半小時配戴本產品，收集器在乳暈四周輕輕按下，使乳汁慢慢地流出。這將有助於減輕腫脹及更容易餵哺。
- 按圖安裝再配戴於乳房上，把收集器放入胸罩內，包圍著乳頭在中間位置，矽膠部份請緊貼胸部並合適和舒適的包圍乳房。確保空氣流通孔是在頂部，保持乳頭四週空氣流通。
- 特別注意：母乳收集器和矽膠罩必須裝配好並完全貼緊乳房，以防止乳汁溢出，影響工作和生活。
- 如果有任何滲漏發生時，請在收集器下邊放入胸墊。

四、清洗方式

- 第一次使用前請拆開每一個部分，並將產品放置在瓶子消毒或煮沸10分鐘。
- 每次使用後，請用溫和的肥皂和溫水清潔所有部分。清洗後請保持乾爽。

五、產品特點

- 有助於治療胸部疼痛。
- 幫助減輕在懷孕期或哺乳期間乳房腫脹的問題。
- 舒緩乳頭因與衣服磨損而引起的不適。
- 易於使用和清潔。

六、適用人群

懷孕，哺乳期，有乳房腫脹問題或乳頭疼痛的母親皆適用。

保存這些說明書